

Elastisk binda  
Form Stretch, steril



**Ingående delar/material**

**Vikt**

**Färg**

**Material:** 62% Bomull  
30% Polyamid  
8% Elastan

**Gramvikt total:**

ca 80 g/m<sup>2</sup>

vit

**Längd**

osträckt: ca 2,1 m

utsträckt: ca 4,2 m

**Elasticitet:** ca 100%

**Förpackningar**

Innerförpackning IFP  
Avdelningsförpackning AFP  
Transportförpackning TFP

**Material**

medicinskt papper/plast  
ask med lock  
kartong

**Avfallshantering\***

förbränning/mjukplast  
kartong  
kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Storlek	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
3250031	6 cm x 4 m	1	20	4 x 20 = 80	TFP
3250032	8 cm x 4 m	1	20	4 x 20 = 80	TFP
3250033	10 cm x 4 m	1	20	4 x 20 = 80	TFP
3250034	12 cm x 4 m	1	20	4 x 20 = 80	TFP
3250035	15 cm x 4 m	1	20	4 x 20 = 80	TFP
3258131	6 cm x 4 m	1	10	8 x 10 = 80	TFP
3258132	8 cm x 4 m	1	10	8 x 10 = 80	TFP
3258133	10 cm x 4 m	1	10	8 x 10 = 80	TFP
3258134	12 cm x 4 m	1	10	8 x 10 = 80	TFP
3258135	15 cm x 4 m	1	10	8 x 10 = 80	TFP

MBE = minsta beställningsbara enhet är TFP

### Indikation

Flergångsbinda för fixering, stöd och avlastning

### Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna genom att lyfta avdelningsförpackningens lock och ta ur en binda.
2. Fixera med önskad teknik.
3. Observera att bindan endast är steril vid första användningstillfället.

### Tvättråd



### Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass Is
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2021

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

### Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



#### Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd  
Paojiang Industrial Zone  
Shaoxing, Zhejiang  
China

#### Importer:

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)

#### EC-REP:

Obelis S.A.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels  
Belgium