

Skyddsförkläde Castor utan ärm, individuellt vikt



Ingående delar/material

Material: 100% Polyeten
präglad yta

Bredd: 80 cm

Längd: 125 cm

Tjocklek

0,02 mm

Färg

Transparent

Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

kartong
kartong

Avfallshantering*

kartong
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	St/AFP	St/TFP	MBA
8250	50	10 x 50 = 500	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Engångs skyddsförkläde för arbete där risk för mindre stänk av vätskor förekommer.



Bruksanvisning

1. Öppna förpackningen genom att pressa vid perforeringen på askens ovansida.
2. Lyft ut ett förkläde ur asken.
3. Skaka förklädet för att veckla ut det.
4. Trä öglan i förklädet runt nacken.
5. Använd de långa plastremarna i förklädets sidor för att knyta fästa förklädet runt midjan.
6. Förklädet kan enkelt rivs sönder vid avtagning.
7. Kasseras i enlighet med instruktion under punkten avfallshantering.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. PPE Klass I Regulation (EU)2016/425

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet. Tillverkning sker i Kina.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Ningbo Transo medical CO., LTD
Room 1608, No.18 Diamond commercial plaza, No.409
Jiang'an Road, Jiangbei District
Ningbo 315021 China

Distributor:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se